




FLEISCHHACKER

Intraossärer Zugang – Der direkte Weg zur Rettung

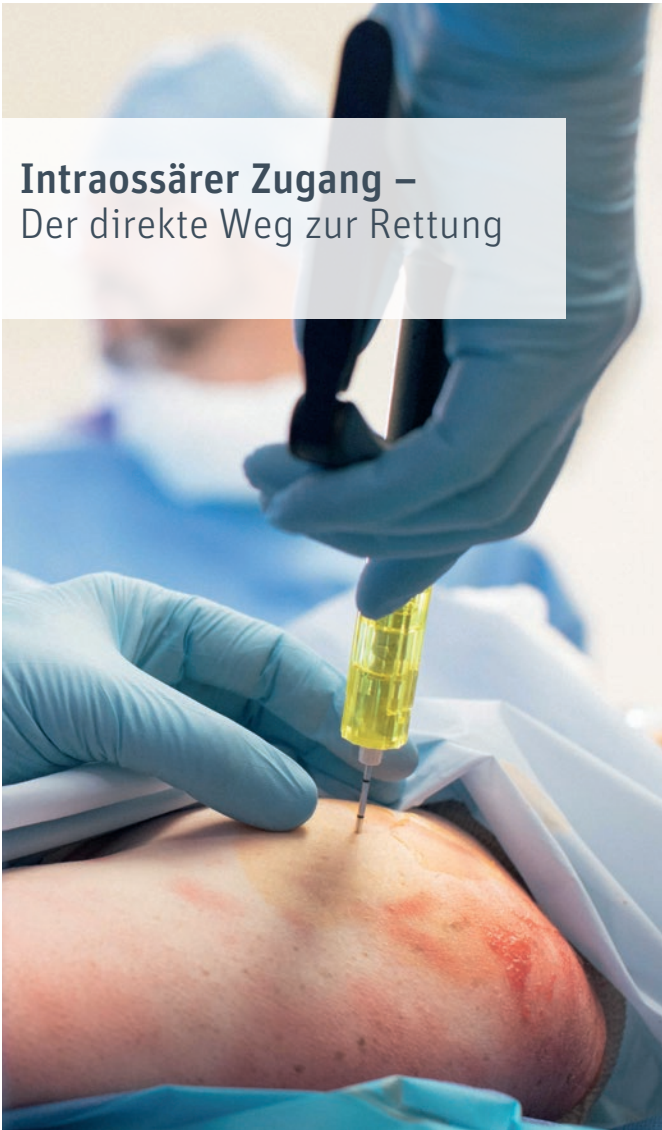

PRÄZISE. SICHER. EFFIZIENT.

Das SAM IO-System ist ein handbetriebenes Bohr-
ossären Zugang. Die Katheterplatzierung erfolgt
wodurch die Nadeleinheit in Rotation versetzt wird,
dies eine präzise und kontrollierte Einführung in



hrsystem für den schnellen und sicheren intra-
gt durch wiederholtes Betätigen des Auslösers,
rd. In Kombination mit sanftem Druck ermöglicht
n den Knochen.



- ① **SAM IO-Bohrer**
Manuell bedienbares, wieder-
verwendbares und leichtes (ca.
71 g) Instrument für intraossä-
ren Zugang, gefertigt aus wider-
standsfähigem Polycarbonat.
- ② **SAM IO-Nadeln**
Presspassungsgesicherte Stilet-
und Kathetereinheit in den Län-
gen 15 mm, 25 mm und 45 mm.
Sichtbare Nabe für einfache
Identifizierung.
- ③ **SAM IO-Nadeladapter**
Ermöglicht die Verwendung
alternativer 10er-Nadeln.
- ④ **SAM IO-Stabilisator**
Durch sein zylindrisches Design
wird der Katheter vor dem Ab-
rutschen geschützt.
- ⑤ **Needle Vise-Nadelbehälter**
Einweg-Auffangbehälter für Sti-
letts, standardmäßig in jedem
Nadelset.
- ⑥ **Verlängerungsschlauch**
Ermöglicht flexible Infusionen
durch Anschluss an den Katheter.

Einfache Anwendung in drei Schritten:

Platzieren – die Nadel wird in die gewünschte Position geführt.

Aktivieren – durch wiederholtes Drücken des Auslösers erfolgt die kontrollierte Einführung.

Anschließen – nach erfolgreicher Platzierung wird der Mandrin entfernt, der Luer-Lock freigelegt und das Verlängerungsset angeschlossen.

Dann können Aspirationsprüfung, Spülung und die gewünschte Behandlung durchgeführt werden.

Notfallmedizin


Klinik & Rettungsdienst

Militär & Katastropheneinsätze



Trainieren für den Ernstfall

Das SAM IO-Trainingsset bietet eine realitätsnahe Möglichkeit, die Handhabung des Systems unter kontrollierten Bedingungen zu üben. Perfekt für medizinisches Fachpersonal, Rettungsdienste und Ausbildungseinrichtungen.

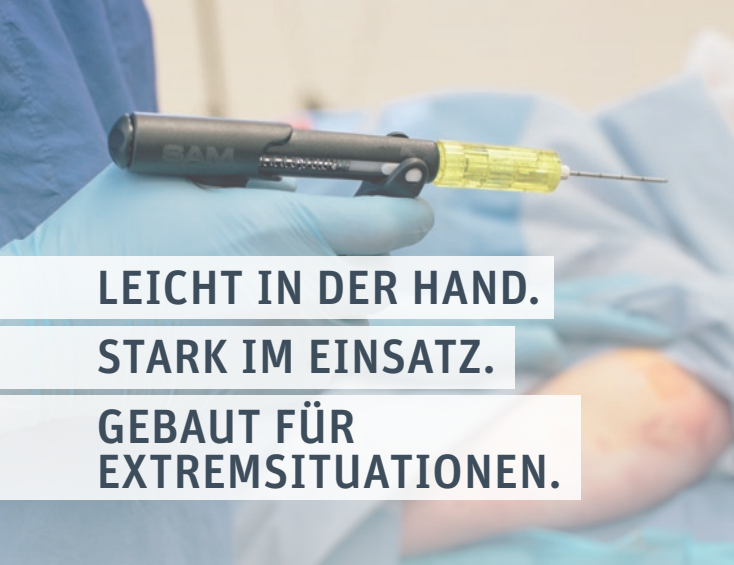

LEICHT IN DER HAND.

STARK IM EINSATZ.

**GEBAUT FÜR
EXTREMSITUATIONEN.**

SAM IO – die intuitive Lösung für den intraosären Zugang in kritischen Situationen. Seine schnelle und einfache Handhabung ermöglicht eine effiziente Verabreichung von lebensrettenden Medikamenten und Flüssigkeiten über das Knochenmark.

Entwickelt für den Notfalleinsatz, bietet das SAM IO-System einen zuverlässigen und sofortigen Zugang zum Kreislauf des Patienten – wenn jede Sekunde zählt.



**Federleichtes, batterieloses Design –
sofort einsatzbereit**



**Haptisches Feedback für eine intuitive
Platzierung**



Manuelle Kontrolle für absolute Präzision

Geprüft unter extremen Bedingungen (MIL-STD 810G) – von extremer Hitze bis hin zu vollständigem Eintauchen in Wasser.



FLEISCHHACKER

Fleischhacker GmbH & Co. KG
An der Silberkuhle 18
58239 Schwerte

T 02304 931-0
F 02304 931-199
info@fleischhacker.biz
www.fleischhacker.biz



Direkt zum
SAM-IO® Bohrer

